

# HU octenisept® sebgél

## Használati utasítás

● **Mi az octenisept® sebgél és mikor alkalmazandó?** Az octenisept® sebgél a bőr heveny sérülései, horzsolások, vágott vagy metszett sebek, könnyebb égési sérülések (például napégés) kezelésére szolgál.

A sebek optimális gyógyulásához elegendő nedvességre van szükség. A gyógyulási folyamat során a bőrsejteknek osztódnuk és vándorolniuk kell. Ez leginkább nedves sebkörnyezetben lehetséges. A sebet ezen kívül a fertőzésektől is óvni kell.

Az octenisept® sebgél különleges összetétele miatt optimálisan nedvesen tartja a sebet és védő réteget alkot a baktériumokkal szemben. Ez a védőréteg megakadályozza, hogy a sebbe kórokozók jussanak, mivel ezeket a kórokozókat már a gélben hatástalanítja. Az octenisept® sebgél megvédi az (új) fertőzésektől és gyulladástól. Ezúton is segíti és gyorsítja a seb természetes gyógyulását.

Az octenisept® sebgél szintelen és a seb bekenésekor égető érzést nem okoz. Gyermeknél is alkalmazható!

● **Hogyan alkalmazzuk az octenisept® sebgélt?** Közvetlenül a sérülést követően fertőtlenítsük a sebet octenisept® sebfertőtlenítővel. Ezután kenjük be a sebet vékony rétegben octenisept® sebgéllal. Szükség esetén kötést vagy ragtapaszt is alkalmazhatunk.

A teljes gyógyulásig kenjük be a sebet naponta 1-2 alkalommal sebgéllal.

A gél tubusának hegyét higiéniai okokból ne érintsük a sebhez vagy más felülethez.

● **Milyen mellékhatások lehetségesek?** Az octenisept® sebgélnél ez idáig mellékhatások nem ismeretesek. A termékkel kapcsolatban fellépő súlyos eseteket jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hivatalnak.

● **Melyek a lehetséges kölcsönhatások?** Túllhálós gézlappal történő alkalmazása esetén rászáradhat a sebre, ami megnehezíti a gézlapp eltávolítását. Ne alkalmazza sebtisztító szappanokkal, kenőcsökkel, olajokkal, enzimekkel vagy hasonló készítményekkel, mert csökkenhet ezek bakteriosztatikus hatása. Ne alkalmazza PVP-jóddal sem, mert elszíneződéshez és a PVP-jód antiszeptikus hatásának csökkenéséhez vezethet.

● **Mire ügyeljünk az octenisept® sebgél alkalmazásánál?** Két hétnél hosszabb ideig csak orvosi felügyelet mellett használja az octenisept® sebgélt. Mivel az allergiás tünetek sohasem zárhatóak ki, ne alkalmazzuk az octenisept® sebgélt olyan személyeknél, akiknél ismeretes vagy gyanítható, hogy valamelyik alkotórésszel szemben túlérzékenyek.

**Kizárólag külsőleg alkalmazható. Az esetleges szövetkárosodást megakadályozandó az octenisept® sebgélt nem szabad porcszövetre, illetve a fülben vagy az orrban alkalmazni! Nem szabad a szembe jutnia! Nem alkalmazható infúzióban vagy injekcióban! Tilos szájon át alkalmazni!**

Csak akkor használja, ha a csomagolás sértetlen!

● **Hogyan tároljuk az octenisept® sebgélt?** Védjük a tubust a közvetlen nap-sugárzástól. A felbontatlan csomagolás 5°C és 25°C közötti hőmérsékleten történő tárolása esetén az octenisept® sebgél a csomagoláson feltüntetett lejárati ideig (lásd a nyomatot) használható fel. Gyermekek elől elzárva tartandó!

● **Hogyan semmisítsük meg az octenisept® sebgélt?** A csomagolóanyagot a háztartási hulladékkal együtt kell megsemmisíteni.

### ● Egyéb információk

#### Összetétel / technikai adatok:

octenisept® sebgél: Aqua purificata, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Octenidine HCl

Küllem és illat: áttetsző, opálos és szagtalan gél. Minőségét szobahőmérsékleten az eltarthatósági adatoknak megfelelően megőrzi.


Legutolsó módosítás: 2022/05





**Schülke & Mayr GmbH**  
Robert-Koch-Str. 2 • 22851 Norderstedt,  
Germany  
Tel: +49-40-521 00-0  
Fax: +49-40-521 00-318  
Schülke & Mayr Ges.m.b.H  
A-1070 Wien  
Tel. +43 1 5232501-0  
www.schuelke.com

**Distributed by / Distributer:**  
OPH Oktal Pharma d.o.o., Pot k sejmišču 26a,  
1231 Ljubljana-Črnuče; Slovenija  
Schulke CZ s.r.o. Lidická 445, 735 81 Bohumin  
Schülke & Mayr Ges.m.b.H, 1070 Wien  
www.schuelke.com  
Allegro Kft., Berlini u. 47-49, 1045 Budapest  
Hungary  
Article code 121607

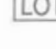



 **Dodržujte informaci o používání produktu**  
Tartsa be a használati utasítást  
Upoštevejte navodila za uporabo

 **Uchovávejte mimo dosah dětí**  
Gyermekek elől elzárva tartandó!  
Shranjujte nedosegljivo otrokom.

 **Chraňte tubu před přímým slunečním světlem**  
Védjük a tubust a közvetlen napsugárzástól  
Tubo zavarujte pred neposredno izpostavitivju soncu.

 **výrobce**  
Gyártó  
Proizvajalec

 **LOT** označení šarže  
Gyártási sorozat szám  
Številka serije: odtisnjena na embalaži

 **upotřebitelný do: rok / měsíc**  
Felhasználható: év / hónap  
Rok uporabnosti: odtisnjen na embalaži

20003942-A